

Radiometer:n SafePico Aspirator –verikaasuruiskun käyttöohje

1. Aspiroi näyte, huom. ota korkki pois aspiroinnin ajaksi
2. Laita korkki ruiskun päähän
3. Poista ilmakuplat:
 - käännä ruisku pystyasentoon, korkki ylöspäin
 - napsauta ruiskua sormella, jotta ilmakuplat nousevat ylös
 - paina ruiskun mäntää, jolloin veri nousee korkkiin ja ilma poistuu korkin kautta

Huom. Jos ruiskussa on todella paljon ilmakuplia, niin poista ylimääräiset ilmakuplat painamalla mäntää ylöspäin ennen kuin asetat korkin ruiskuun. Tämän jälkeen aseta korkki ja menettele kohdan 3. mukaan

4. Sekoita ruiskua kääntelemällä ylösalaisin vähintään kymmenen kertaa tai aseta ruisku SafePico mikseriin ja paina mustaa painiketta kerran (mikseri sekoittaa näytteen 7 s.)
5. Analysoi näyte mahdollisimman pian

